

### Deklaracja zgodności.

Krzesełko profilaktyczno-medyczne jest zgodne z przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o wyrobach medycznych i jest klasy 1, reguła 1 a wytwórca potwierdza, że postępuje zgodnie z załącznikiem I i IV Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2004 roku w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych różnego przeznaczenia.

### Uwaga:

Prosimy pamiętać, że krzesło należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem. Jest ono przeznaczone dla jednej osoby. Nie wolno na nim stawać. Nie należy pozostawiać w miejscach o dużej wilgotności powietrza czy też w bezpośrednim sąsiedztwie źródeł ciepła. Maksymalne obciążenie dla krzesła wynosi 130 kg. Demontaż lub montaż jakichkolwiek elementów krzesła może spowodować utratę gwarancji, oraz niewłaściwe działanie medyczne krzesła. Producent udziela 24 miesięcy gwarancji na elementy mechaniczne oraz wady ukryte powstałe w momencie produkcji. Reklamacje należy zgłaszać pod nr tel. **0-12 411 22 23** od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00

Kolor .....

Data sprzedaży .....




### Wytwórca:

Gabinet Terapii Manualnej i Bioenergoterapii „KULIK-SYSTEM”,  
31-514 Kraków, Al. Beliny-Prażmowskiego 17/13.

### Biuro Handlowe „Kulik-System”

31-523 Kraków, ul. Kasprowicza 32  
tel/fax 012-411-22-23, tel. 012-411-22-32,  
e-mail: [biuro@kulik-system.pl](mailto:biuro@kulik-system.pl),  
<http://www.kulik-system.pl>

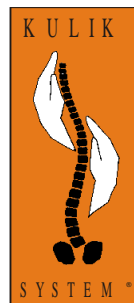

### INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA KRZESŁA

FOTEL BIUROWY PROFILAKTYCZNO-REHABILITACYJNEGO  
„K3” BUSINESS

Krzesełko jest zarejestrowane jako produkt medyczny w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych pod nr **PL/DR 015298**



Regulacja kąta pochylenia oparcia wraz z kątem pochylenia siedziska

Wzdłużna regulacja siedziska


Specjalne wybranie stabilizujące miednicę połączone z kanałem wentylacyjnym

Idealne podparcie kręgosłupa wraz z podparciem bocznym

Zapadkowa regulacja wysokości oparcia

Regulacja wysokości podłokietników

Regulacja wysokości krzesła

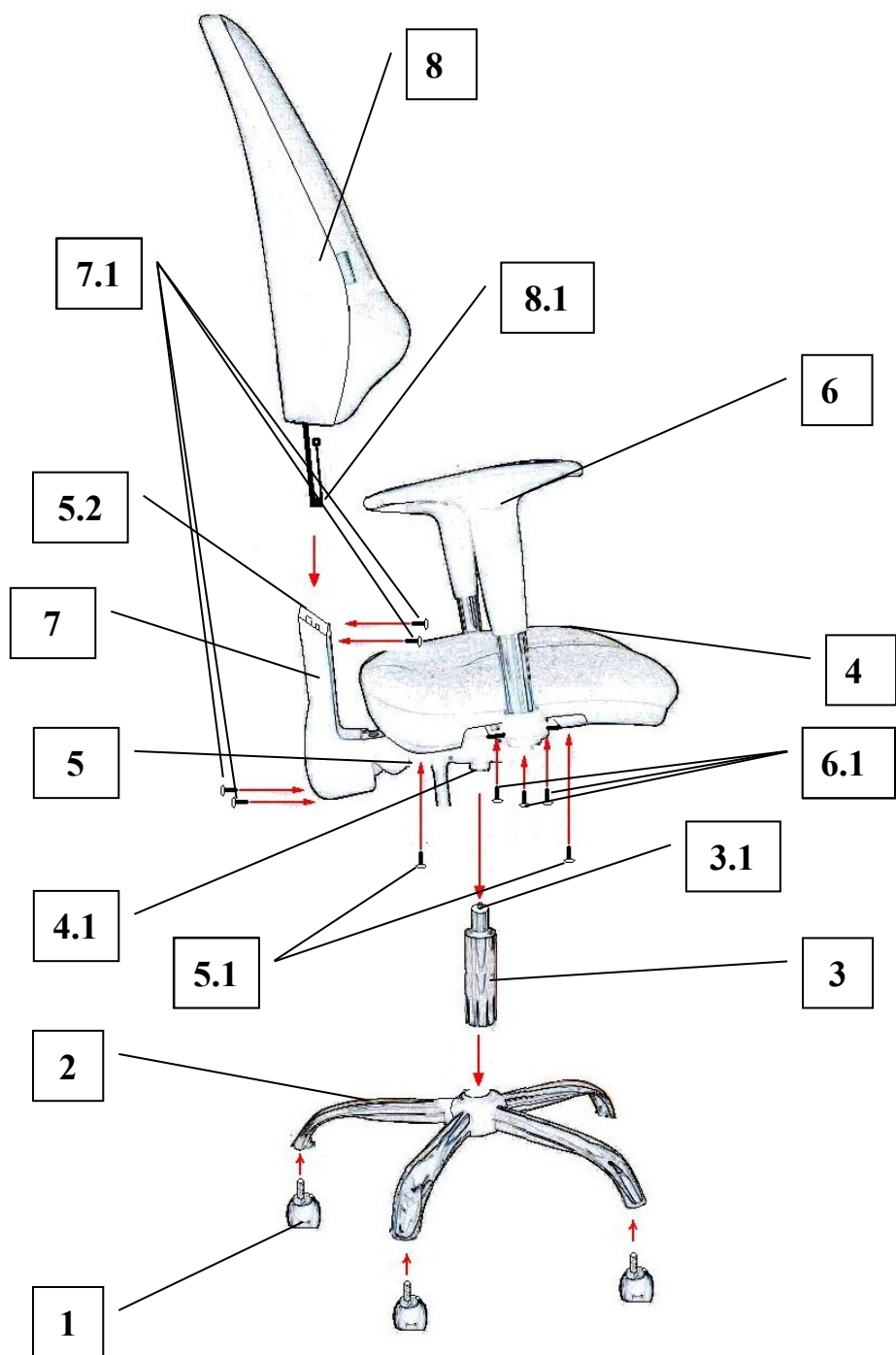

#### Instrukcja montażu:

Trzpień kółka 1 wciskamy w otwór w podstawie 2 (tak postępujemy po kolei z 5 kółkami),  
 Teleskop 3 wciskamy od góry w otwór środkowy w podstawie 2,  
 Do siedziska 4 przykręcamy mechanizm 5 (mocujemy go do mechanizmu przesuwu w  
 otwory znajdujące się na skraju w tylnej części siedziska za pomocą czterech śrub 5.1, w  
 trakcie przykręcania mechanizm przesuwu należy wysunąć maksymalnie do tyłu)  
 Siedzisko 4 nakładamy otworem 4.1 na górny trzpień 3.1 teleskopu 3. Mocno dociskamy  
 do podłoża, po czym siadamy, aby docisnąć elementy ciężarem swojego ciała,  
 Podłokietniki 6 przykręcamy do siedziska 4 za pomocą śrub mocujących 6.1 dołączonych  
 do zestawu

Jedną część osłony mechanizmu 7 nakładamy na pionową część mechanizmu 5  
 dokładamy drugą część osłony i skręcamy za pomocą wkrętów 7.1

Oparcie 8 mocujemy do siedziska 4 po przez wciśnięcie prowadnika 8.1 w rowek  
 mechanizmu 5.2. Po czym dociskamy oparcie 6 do oporu i pociągamy w górę, aby uzyskać  
 odpowiedni poziom ustawienia

Dziękujemy za zakup naszego krzesła profilaktyczno-rehabilitacyjnego. Przed użyciem  
 zapoznaj się z opisem produktu, instrukcją użytkowania oraz treścią, która zawiera  
 wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych oraz informacje  
 dotyczące stosowania produktu medycznego. Stosowanie podanych wskazówek przy  
 codziennej eksploatacji produktu pozwoli na jego długotrwałe i zgodne z  
 przeznaczeniem używanie.

**Cel stosowania:** Krzesło profilaktyczno-rehabilitacyjne ma na celu zarówno  
 profilaktykę, jak i czynne działanie zmierzające do przywrócenia właściwego ułożenia  
 pozycji kręgosłupa. Krzesło to ma na celu przywracanie prawidłowości krzywizn  
 kręgosłupa oraz anatomiczne ułożenie łopatek, wymuszając zachowanie takiego stanu  
 przez cały czas użytkowania.

**Wskazania:** zaleca się używanie produktu w celu prawidłowego ułożenia kręgosłupa na  
 całej jego długości jak również zmniejszenia ryzyka powstawania nowych schorzeń  
 kręgosłupa oraz łagodzenia już istniejących. Krzesło to jest przeznaczone dla chorych  
 na lumbago, rwę kulszową i inne zespoły bólowo-korzeniowe, a także dla osób ze  
 zniekształceniami kręgosłupa. Ma ono na celu ułatwienie przyjęcie prawidłowej pozycji  
 anatomicznej osobie siedzącej.

**Przeciwwskazania:** uczulenie na którykolwiek ze składników produktu, skolioza  
 patologiczna, skolioza strukturalna trzeciego stopnia, powiększona lordoza, osobom  
 mającym inne schorzenia kręgosłupa lub w razie pojawienia się jakichkolwiek  
 wątpliwości zaleca się konsultację u lekarza specjalisty lub chiropraktyka.

**Sposób czyszczenia:** Plamy i zabrudzenia tapicerki należy usuwać za pomocą miękkiej  
 ściereczki oraz roztworu wody i mydła (temp. 30° C), ewentualnie łagodnych środków  
 czyszczących; suszyć w temperaturze pokojowej. Części z tworzyw sztucznych czyścić  
 przy pomocy ogólnodostępnych nierysujących środków czystości.

**Uwaga:** Nie należy czyścić agresywnymi środkami chemicznymi zawierającymi  
 rozpuszczalniki i wybielacze.

**Odporność na zmienne warunki środowiska:** Chronić przed bezpośrednim wpływem  
 warunków zewnętrznych (zamoczenie, wystawianie na słońce, długotrwały wpływ  
 mrozu).

#### Składniki:

**Elementy tapicerowane:** pianka poliuretanowa wysokoelastyczna, tkanina tapicerska  
 14% bawełna, 86% poliester

**Elementy konstrukcji:** tworzywo PP, PE, oraz stal.

